


# HYCISUN<sup>®</sup>



Anbio Biotech

## COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung

**REF A6061213**

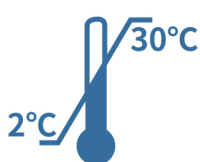

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zur Eigenanwendung nach §11 MPG in Deutschland (BfArM GZ: 5640-S-058/21)

**HYGISUN<sup>®</sup>**

EAN: 4260676530614



1 PCS/box

500 Box/ctn

6000 PCS/pallet

**Contents tests****Kit****COVID-19 Antigen Test Card****1 test****Extraction Solution****1 ml / tube****Saliva collection device****1****Instruction for Use****1****Plastic Dropper****1**

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

REF A6061213

**HYCISUN<sup>®</sup>**



Anbio Biotech

# COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold)

**Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung**

## Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

Saliva test for personal use

Packungsinhalt: **1** TEST  
Package: **1** TEST



Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.  
No.2016, Wengqiao West Road, Xinyang  
Street, Huzhou District, Xiamen, Fujian,  
China



Lonhe NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2385AA,  
The Hague, Netherlands



Sunbeam International GmbH  
Schumannstr. 12, 52146, Würselen, Germany



Packungsinhalt: **1** TEST  
Package: **1** TEST





Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.  
No. 2016, Wengjiao West Road, Xinyang  
Street, Haicang District, Xiamen, Fujian,  
China

EC REP

**Lotus NL B.V.**  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,  
The Hague, Netherlands

IMPORTEUR

**Sunbeam International GmbH**  
Schumanstr.12, 52146, Würselen, Germany



4 260676 530614



**Verwendungszweck:**

Das Kit dient zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen im menschlichen Speichel in vitro.

**Hauptkomponenten:**

Testkassette verpackt im Folienbeutel, Einweg-Pipette, Speichelsammelgefäß mit 1 ml Extraktionslösung, Trichter, Bedienungsanleitung.

**Qualitätsstandard:** IVDD 98/79 / EC

**ANTIGEN SCHNELLTEST (SPEICHELTEST)**

- ALLE NOTWENDIGEN REAGENZIEN ENTHALTEN
- HOHE SENSIBILITÄT UND SPEZIFITÄT

**WICHTIGE HINWEISE**

- SIE SOLLTEN MINDESTENS 30 MINUTEN VORHER NICHTS ESSEN, RAUCHEN, KAUGUMMI KAUEN ODER ALKOHOLISCHE GETRÄNKE ZU SICH NEHMEN.
- SPÜLEN SIE IHREN MUND MIT WASSER AUS UND WARTEN SIE 10 MINUTEN.

TIPP: MASSIEREN SIE IHRE WANGEN UND REIBEN SIE IHRE ZUNGE AM GAUMEN, UM DIE SPEICHELSEKRETION ZU STIMULIEREN.

**IVD**

In Vitro Diagnostik Test




Gebrauchsanweisung beachten.




Nicht zur Wiederverwendung.

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zur Eigenanwendung  
nach §11 MPG in Deutschland (BfArM GZ: 5640-S-058/21)

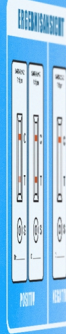

## ERGEBNISANSICHT

SARS-CoV-2  
Antigen

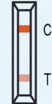


C  
T

○ S

ID: \_\_\_\_\_

SARS-CoV-2  
Antigen

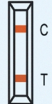


C  
T

○ S

ID: \_\_\_\_\_

**POSITIV**

SARS-CoV-2  
Antigen

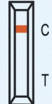

C  
T

○ S

ID: \_\_\_\_\_

**NEGATIV**

**LOT** 2021026139

 20210222

 20230221


 50530551

 50510555

 5051050139

**COVID-19 Antigen Schnelltest**  
**(Kolloidales Gold)**  
**Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung**

**Rapid COVID-19 Antigen Test**  
**(Colloidal Gold)**  
**Saliva test for personal use**

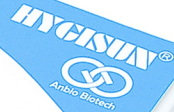

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.  
REF A6061213

**COVID-19 Antigen Schnelltest**  
**(Kolloidales Gold)**  
**Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung**



**Rapid COVID-19 Antigen Test**  
**(Colloidal Gold)**  
**Saliva test for personal use**

Packungsinhalt:  
Package: **1 TEST**

Lot: A6061213  
Expiry Date: 2023/12/31



Anblo (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd

Package: 1 Test

**Rapid COVID-19 Antigen Test  
(Colloidal Gold)**

**LOT** 2021016132

 20210112

 20230111

**IVD**

 2°C-30°C



CE

**IVD**

 2°C-30°C



