



Technisches Datenblatt Atemschutzmaske XBRGwhite

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 5295 |
| Bezeichnung | Atemschutzmaske XBRGwhite |
| Angewandte Norm | DIN EN 149:2009 |
| Verwendung | Schutz gegen feste und flüssige Partikel mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe. Ohne Ausatemventil. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt. |
| Einsatzlimit | bis 10-facher Grenzwert |
| Beschreibung | Die Atemschutzmaske XBRGwhite mit elastischer Ohrschleife bietet dem Träger einen wirksamen Schutz vor dem Einatmen von festen und nicht verdampfenden flüssigen Partikeln, Krankheitserregern und Aerosolen. Sie besteht aus 5 Lagen und hat kein Ventil. |
| Verwendete Materialien | Spinnvlies Meltblown Hot Cotton Polyesterband, latexfrei (Ohrband) Kunststoffummantelter Draht (Nasenbügel) |
| Aufbau | 5-lagig |
| Farbe | weiß |
| Funktionsprinzip | Die Partikelfiltration findet durch die zwei Meltblown Schichten statt. |
| Einsatzbereich | Die Atemschutzmaske XBRGwhite ist für den Einsatz gegen feste und nicht flüchtige Partikel geeignet. |
| Gewicht | 8g |
| Partikelfiltrationsgrad | >94% |
| Einatemwiderstand | bei 30l/min konstant Testergebnis: 0,4 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 0,6 mbar) bei 95l/min konstant Testergebnis: 1,5 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 2,4 mbar) |
| Ausatemwiderstand | bei 160l/min konstant Testergebnis: 2,1 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 3,0 mbar) |
| Kennzeichnung der Maske | Markenzeichen Hersteller (Logo) Produktbezeichnung Gültige Norm Chargennummer CE-Kennzeichnung Nummer der Prüfstelle |
| Handhabung | Atemschutzmaske erst unmittelbar vor gebrauch aus der Folie nehmen und gemäß Anleitung über Mund, Kinn und Nase anbringen (siehe Beilagezettel/Kartonschachtel) |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Das aufgedruckte Ablaufdatum auf der Maske beachten. Die Maske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. |

ANSCHRIFT

Maskenshop Berlin PSA GmbH
Köpenicker Straße 16 - 17
10997 Berlin

KONTAKT

T +49 (0) 30 81 45 57 10
F +49 (0) 30 81 45 57 17
E mail@maskenshop-berlin.de
W www.maskenshop-berlin.de

STEUER

USt.ID DE 274 958 099
Registereintrag: HRB 225613B
Registerrichter: AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Lysander Huth

BANKVERBINDUNG

IBAN DE27 1005 0000 0191 0012 01
BIC BELADEBEXXX
Bank Berliner Sparkasse
Inh. Maskenshop Berlin PSA GmbH



Hinweise des Herstellers

Die Maskenshop Berlin PSA GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Labortestwerte können in der Praxis erheblich von denen, die im Labortest ermittelt wurden abweichen. Dies kann zu kürzeren oder längeren Haltezeiten führen. Die Gebrauchsinformation ist vom Verwender gelesen und verstanden werden. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Anleitung, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere der Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte, Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden.“ Die Lagerung der Maske sollte in einem Temperaturbereich von -20° bis $+50^{\circ}\text{C}$ bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von $<80\%$ gelagert werden. Der Transport wird in der Originalverpackung empfohlen.

Entsorgungshinweise

Gebrauchte oder kontaminierte Produkte sollten nach den Bestimmungen am Verwendungsort entsorgt werden.

ANSCHRIFT

Maskenshop Berlin PSA GmbH
Köpenicker Straße 16 - 17
10997 Berlin

KONTAKT

T +49 (0) 30 81 45 57 10
F +49 (0) 30 81 45 57 17
E mail@maskenshop-berlin.de
W www.maskenshop-berlin.de

STEUER

USt.ID DE 274 958 099
Registereintrag: HRB 225613B
Registerrichter: AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Lysander Huth

BANKVERBINDUNG

IBAN DE27 1005 0000 0191 0012 01
BIC BELADEVB33XXX
Bank Berliner Sparkasse
Inh. Maskenshop Berlin PSA GmbH